

Conseils aux laboratoires pour l'envoi des échantillons de sang total et de LCS au CNR DES ARBOVIRUS A MARSEILLE

- 1) Envoyer les échantillons accompagnés de la fiche de renseignement du CNR remplie aussi complètement que possible. Mentionner les numéros de téléphone ou de fax auxquels le CNR pourra envoyer les résultats.
- 2) Echantillons → dans des tubes bien fermés et portant un code identifiant pour le laboratoire identique à celui de la fiche de signalement :
 - LCS : 500 µl au minimum dans un tube de 2 ml maximum
 - Sang total : 1 tube EDTA de 5 ml stérile
- 3) Ne pas congeler les échantillons mais les conserver strictement à +4°C.
- 4) Expédier les échantillons à l'aide d'emballages conformes à la réglementation pour le transport d'échantillon à visée diagnostique selon vos modalités habituelles avec l'étiquetage spécifique (ci-dessous) à utiliser pour cette surveillance West Nile-Toscana ou contacter le CNR des arbovirus à Marseille qui vous précisera la démarche à suivre.

Adresse physique du CNR des arbovirus pour livraison par transporteur :

ERRIT
CNR des Arbovirus
Institut de Recherche Biomédicale des Armées

HIA LAVERAN
34, boulevard LAVERAN
13013 MARSEILLE

Tél. : 04.91.61.79.10 / Fax : 04.91.61.75.53 / Email : CNRarbovirus@irba.fr

ETIQUETTE de TRANSMISSION

A joindre au prélèvement remis au transporteur habituel

ERRIT
CNR des Arbovirus
Institut de Recherche Biomédicale des Armées

HIA LAVERAN
34, boulevard LAVERAN
13013 MARSEILLE